


Oxford[®]

Sollevatore

Oxford[®] Presence

Manuale d'uso e garanzia

Per evitare lesioni personali, leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare il sollevatore.

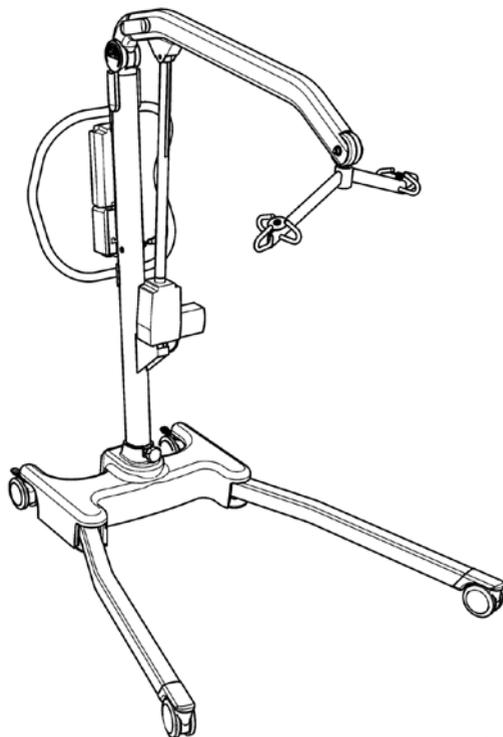

 Joerns
Healthcare

Redefining patient handling

Dati del produttore

Oxford®


EUROPE

Joerns Healthcare Ltd
High Street, Wollaston
Stourbridge, West Midlands
DY8 4PS, UK
+44 (0) 1384 44 66 22
Fax: +44 (0) 1384 44 66 44
www.joerns.co.uk

Sommario

1. Sollevatore Oxford Presence.....	3
2. Introduzione: Informazioni sul sollevatore	4
3. Istruzioni per il montaggio	5
4. Misure di sicurezza.....	9
5. Istruzioni per il funzionamento.....	11
6. Rimozione della barra distanziatrice e del sistema a culla	14
7. Istruzioni per la ricarica delle batterie.....	16
8. Programma di manutenzione e lista di controllo quotidiana	18
9. Specifiche tecniche.....	20
10. Test	22

Sollevatore Oxford Presence

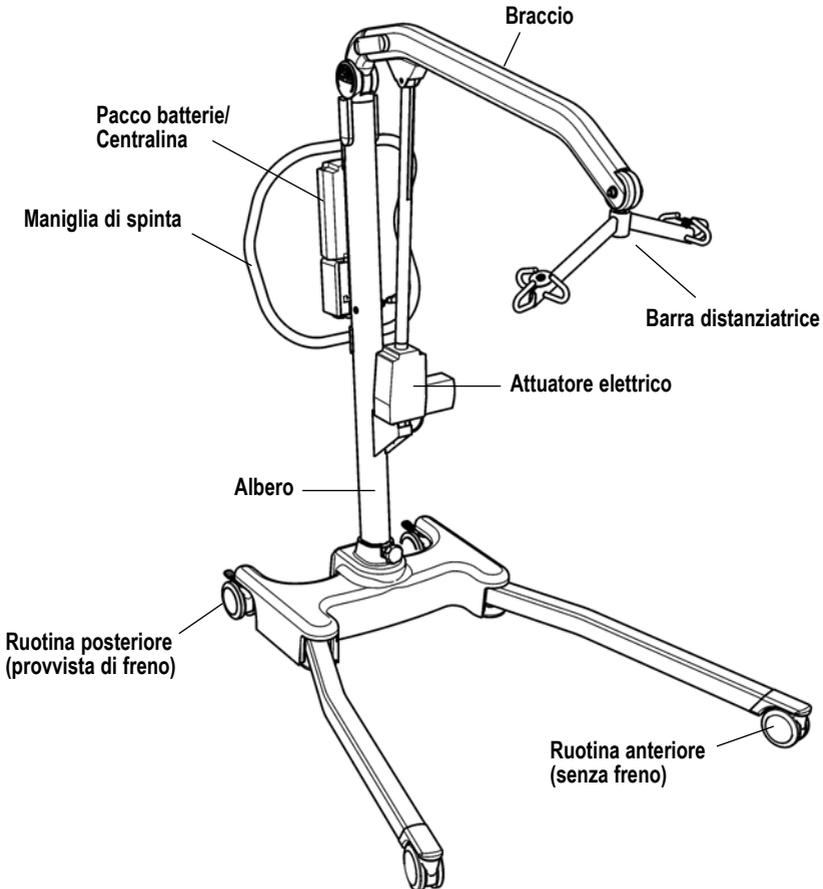

Introduzione: Informazioni sul sollevatore

L'Oxford Presence è un sollevatore elettrico. Ciascun sollevatore Presence viene completamente montato, certificato e testato per il carico prima di essere imballato/spedito.

L'imballaggio è costituito da un cartone molto resistente, costruito appositamente e viene utilizzato sia per l'esportazione che per il mercato nazionale, per poter garantire che il sollevatore arrivi integro.

Una busta fornita insieme ad ogni sollevatore contiene vari documenti che dovrebbero essere conservati per eventuali consultazioni future.

- CERTIFICATO DEI TEST EFFETTUATI
- CERTIFICATO DI GARANZIA DEL RIVENDITORE
- MANUALE D'USO
- CARTA DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
- LISTA DI CONTROLLO DEL CONTENUTO

Il CERTIFICATO DEI TEST EFFETTUATI è un documento importante e verrà richiesto per dimostrare la validità della vostra garanzia. Vale sei mesi. Una volta che il certificato sia scaduto, il sollevatore deve essere controllato e testato secondo il programma di manutenzione.

La manutenzione ed i test periodici possono essere eseguiti dal fornitore. Assicurarsi che il sollevatore sia incluso nel programma di manutenzione di quest'ultimo. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore o al tecnico ortopedico.

Il sollevatore Oxford Presence è adatto alle seguenti CATEGORIE di sollevamento, nell'ambito dei parametri di funzionamento dei sollevatori descritti nelle SPECIFICHE TECNICHE.

- Categoria A - Carrozzina
- Categoria B - Letto
- Categoria C - Bagno (a seconda dell'impostazione)
- Categoria D - Sedia da WC/Doccia
- Categoria E - Pavimento
- Categoria F - Rotazione di 90°

Il sollevatore Oxford Presence viene utilizzato per pazienti in posizione SEDUTA, SEDUTA/SDRAIATA e SUPINA. Qui sotto sono elencate le imbracature che possono essere utilizzate con questo sollevatore.

- Imbracatura Oxford Quickfit
- Imbracatura Oxford Full back
- Imbracatura Oxford Quickfit Deluxe
- Imbracatura Oxford Longseat
- Imbracatura Oxford Access
- Imbracatura a 4 punti e imbottitura Oxford

Il marchio CE:

Il sollevatore Oxford Presence ha ottenuto il marchio CE ed ottempera alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva sulle apparecchiature mediche (93/42/EEC)
- Direttiva EMC (89/336/EEC)
- Direttiva sul basso voltaggio (73/23/EEC)



Istruzioni per il montaggio

CONTENUTO DEL CARTONE

Collocare il cartone in uno spazio libero e aprirlo con cautela. Il cartone contiene:

- IL SOLLEVATORE OXFORD PRESENCE
- BUSTA PER I DOCUMENTI
- TELECOMANDO
- PACCO BATTERIE
- CAVO PER LA RICARICA
- CARICABATTERIA DA SCRIVANIA/SUPPORTO


▲ AVVISO

L'Oxford Presence è pesante e dovrà essere sollevato con attenzione e possibilmente con l'aiuto di un'altra persona.


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Estrarre tutte le parti dal cartone e adagiarle sul pavimento, facendo molta attenzione alle parti verniciate.


1. Collocare il telaio in uno spazio libero e azionare i freni posteriori.

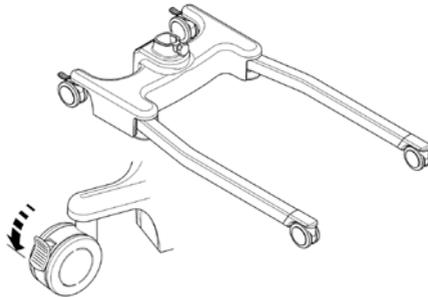

2. Montare l'albero e il braccio nell'incavo del telaio.

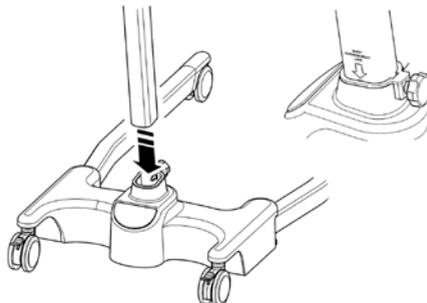

3. Stringere l'albero usando il meccanismo di blocco, situato nella parte anteriore del telaio.


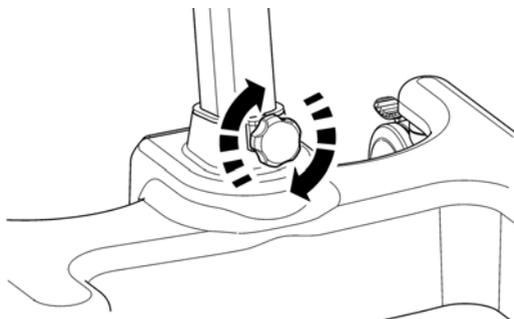


⚠ AVVISO

Attenzione alle dita. Tenerle lontane dall'estremità dell'albero mentre questo viene inserito nell'incavo della base. l'inserimento completo dell'albero è segnalato dall'etichetta che si trova sul lato dell'albero. La base non funziona a meno che l'albero non sia completamente inserito.

4. Stringere a mano la manopola di blocco.
5. Allineare la maniglia al retro dell'albero, quindi fissarla usando gli appositi attacchi. Gli attacchi e la chiave necessari per fissare la maniglia sono contenuti nella busta per i documenti.

NOTA: prima di attaccare la maniglia all'albero, assicurarsi di lasciare fuori tutti i cavi flessibili.

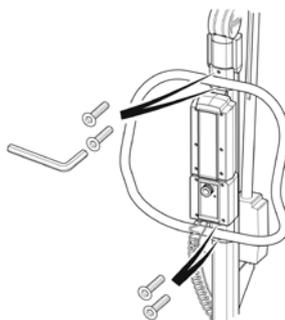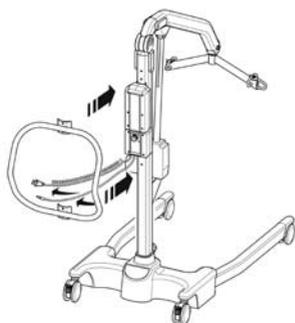


6. Montare il pacco batterie sul sollevatore e chiudere il gancio di fissaggio in modo che il pacco scatti in posizione.

ISTRUZIONI PER SMONTARE IL SOLLEVATORE


Non smontare il sollevatore a meno che non sia necessario eseguirne la manutenzione, la riparazione o il trasporto. Per smontarlo, seguire la procedura di montaggio al contrario.

CONTROLLARE SEMPRE QUANTO SEGUE PRIMA DI UTILIZZARE IL SOLLEVATORE.


- L'albero è saldamente bloccato in posizione.

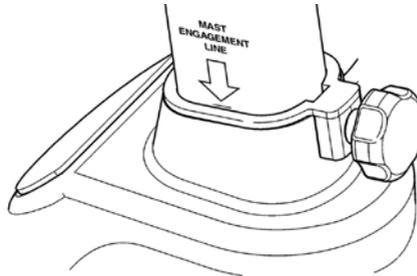


- La base del sollevatore si apre e si chiude senza problemi (usando il telecomando).

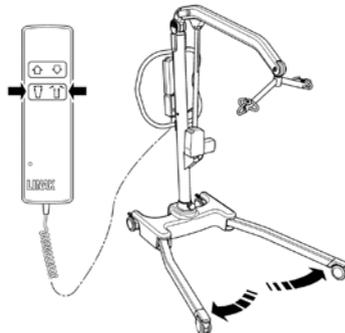

- Il pulsante rosso di arresto di emergenza sulla parte posteriore della centralina è nella posizione OFF (non attivo).

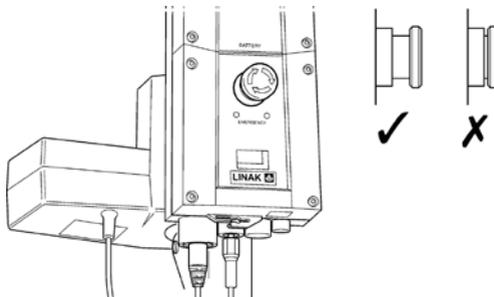

- Premere i pulsanti per la salita e la discesa sul telecomando ed accertarsi che il braccio si alzi e si abbassi.

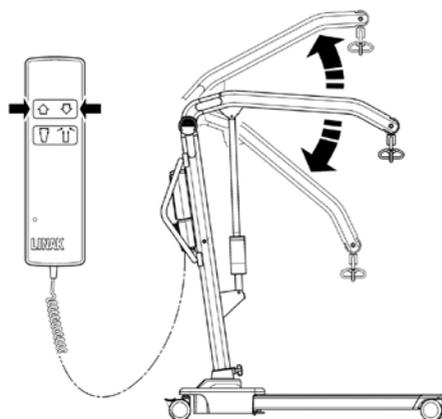



Misure di sicurezza

Leggere e attenersi alle misure di sicurezza qui elencate. Il funzionamento e l'uso dei sollevatori Oxford sono semplici e chiari. Il rispetto di queste poche misure di sicurezza di base renderà facili e sicure le operazioni di sollevamento.

LEGGERE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL SOLLEVATORE PRESENCE.


AVVISO

- Pianificare **SEMPRE** le operazioni di sollevamento prima di cominciare.
- Eseguire **SEMPRE** le operazioni elencate nella LISTA DI CONTROLLO QUOTIDIANA prima di utilizzare il sollevatore.
- Acquisire **SEMPRE** dimestichezza con i comandi di funzionamento e le funzioni di sicurezza del sollevatore prima di sollevare un paziente.
- **NON** usare un'imbracatura, a meno che non ne sia indicato l'uso con il sollevatore.
- Controllare **SEMPRE** che l'imbracatura sia adatta al paziente e che sia della misura e della portata corrette.
- **NON** usare **MAI** un'imbracatura logora o danneggiata.
- Agganciare **SEMPRE** l'imbracatura secondo le istruzioni fornite (manuale d'uso).
- Controllare **SEMPRE** che la portata massima del sollevatore sia adatta al peso del paziente.
- Svolgere **SEMPRE** le operazioni di sollevamento secondo le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- **NON** scollegare o ignorare **MAI** un comando o una funzione di sicurezza solo perché in questo modo sembra più facile far funzionare il sollevatore.
- **NON** sollevare un paziente se i freni delle ruotine sono inseriti. Lasciare sempre che il sollevatore trovi il centro di gravità corretto.
- **NON** tentare di spostare il sollevatore spingendo l'albero, il braccio o il paziente.
- Spostare **SEMPRE** il sollevatore servendosi della maniglia/pedana per spinta di cui è provvisto.
- Abbassare **SEMPRE** il paziente nella posizione più bassa e comoda possibile prima dei trasferimenti.
- **NON** spingere un sollevatore carico a velocità superiore a quella corrispondente a un passo lento (3 km/ora, 0,8 m/secondo).
- **NON** spingere il sollevatore su terreni irregolari o accidentati, in particolare se è carico.
- **NON** tentare superare un ostacolo del pavimento spingendo o tirando il sollevatore carico.
- **NON** forzare **MAI** alcun tipo di comando di funzionamento o sicurezza. Tutti i comandi sono facili da usare e non richiedono una forza eccessiva per essere azionati.

- **NON** fermare un sollevatore carico su alcun tipo di superficie in pendenza.
- **NON** usare i sollevatori elettrici nella doccia.
- **NON** ricaricare un sollevatore elettrico in bagno.
- **NON** sollevare un paziente se non si ha la competenza necessaria.
- Il sollevatore è concepito per sollevare pazienti. **NON** usarlo, né permettere che venga usato, per qualsiasi altro scopo.
- **NON** spingere il sollevatore giù da gradini, carico o scarico che sia.
- **NON** tentare di spingere un sollevatore carico su un pendio più inclinato di circa 5 gradi.
- **NON** tentare di spostare un paziente lungo un pendio senza la presenza di una seconda persona.
- **NON** utilizzare il sollevatore in un ambiente umido o corrosivo, ad esempio nei pressi di una piscina.

Istruzioni per il funzionamento

COMANDI DI FUNZIONAMENTO

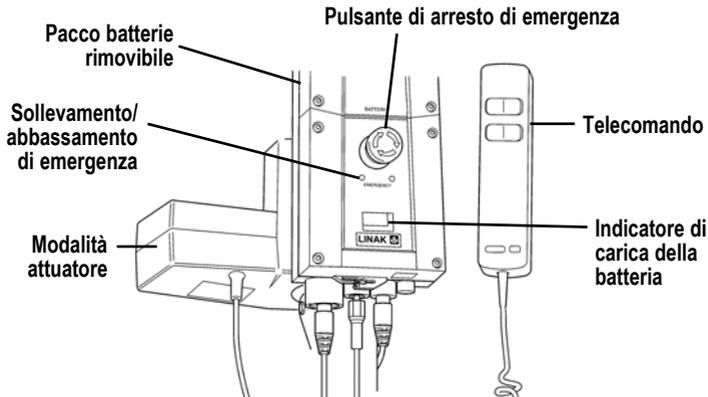

1. Regolazione della base

La base del sollevatore Oxford Presence è regolabile elettricamente in larghezza. Può essere aperta per consentirne il posizionamento intorno a poltrone o carrozzine. Per il trasferimento e il passaggio attraverso porte strette e passaggi difficili la base del sollevatore dovrebbe essere nella posizione chiusa. Per regolare la base elettricamente, premere i pulsanti appropriati sul telecomando. La base si blocca ogni qualvolta venga rilasciato il pulsante del telecomando.

2. Ruotine con freni

Il sollevatore ha due ruotine provviste di freni che possono essere azionati qualora si voglia bloccare il sollevatore. Quando è in corso il sollevamento, le ruotine dovrebbero essere lasciate libere, con il freno disinserito. In questo modo il sollevatore sarà libero di muoversi verso il proprio centro di gravità. Se i freni sono inseriti, sarà il paziente a pendere verso il centro di gravità, ma in questo modo potrebbe sentirsi a disagio e trovarsi in una posizione decisamente poco confortevole.

3. Sollevamento e abbassamento del braccio

Il movimento del braccio è garantito da un potente attuttore elettrico, controllato da un semplice telecomando. Il telecomando ha due pulsanti con le frecce direzionali SU e GIÙ. L'attuttore si arresta automaticamente quando raggiunge il limite di movimento in entrambe le direzioni. Il telecomando va inserito in una presa sulla base della centralina.

4. Arresto di emergenza

Il pulsante rosso di arresto di emergenza è situato sulla parte anteriore della centralina e, per azionarlo, è necessario premerlo. Questo pulsante toglie l'alimentazione al sollevatore e può essere resettato solo girandolo in senso antiorario e rilasciandolo.

5. Sollevamento/abbassamento elettrico di emergenza

I pulsanti di abbassamento (down) e sollevamento (up) di emergenza sono situati sulla parte anteriore della centralina. Per attivarli, inserire la punta di una penna a sfera nel pulsante desiderato. In questo modo sarà possibile alzare/abbassare il braccio nel caso in cui il telecomando non dovesse funzionare.

6. Abbassamento meccanico di emergenza

L'attuatore elettrico è dotato di un dispositivo di abbassamento meccanico (LEVA ROSSA) che è possibile azionare in caso di guasto elettrico. Questo dispositivo funziona solo quando il sollevatore è sotto carico. Tirare il dispositivo verso l'alto per attivarlo e abbassare lentamente il sollevatore.

7. Batterie

Le batterie sono protette dalla possibilità di scaricarsi da un ALLARME DI CARICA BASSA. Questo allarme suona solo ed esclusivamente se, durante l'utilizzo del telecomando, è necessario caricare le batterie. NON IGNORARE QUESTO ALLARME. Completare le operazioni di sollevamento e mettere la batteria sotto carica (vedere Istruzioni per la ricarica).

8. Imbracature


Il sollevatore Oxford Presence è dotato di una barra distanziatrice a 6 punti e di un sistema a culla a 4 punti. I due sistemi utilizzano metodi di aggancio ed imbracature differenti.

Il sistema a 6 punti utilizza delle imbracature con occhielli di tessuto colorati per le diverse posizioni. Il sistema a culla a 4 punti è dotato di un fermaglio di sicurezza Securi3. Per regolarlo, è necessario ruotarlo verso l'alto o il basso.

Imbracature con occhielli: Imbracature Oxford Quickfit, Full back, Quickfit Deluxe, Longseat, Silkfit e Access


Imbracatura con fermaglio di sicurezza: imbracatura a culla a 4 punti e imbottitura Oxford

Per agganciare il sistema a 6 punti alla barra distanziatrice, utilizzare gli occhielli (vedere l'illustrazione riportata di seguito). L'imbracatura viene fornita con istruzioni da leggere attentamente prima di utilizzare il sollevatore.

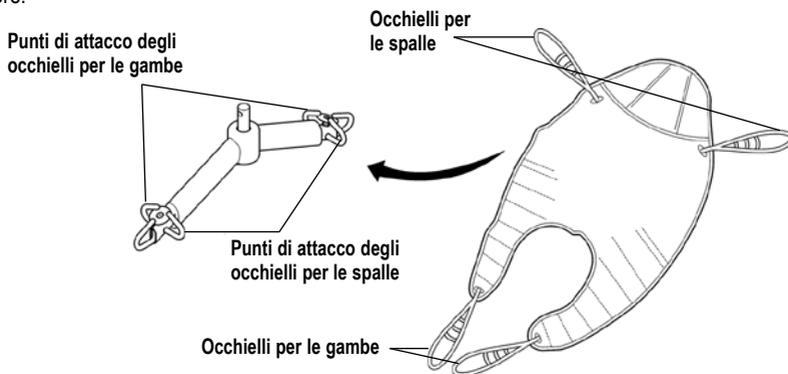


Barra distanziatrice a 6 punti: esempio di un'imbracatura con occhielli per l'attacco a una barra distanziatrice a 6 punti.

Per attaccare l'imbracatura alle viti del sistema a culla a 4 punti, utilizzare il fermaglio di sicurezza (vedere l'illustrazione riportata di seguito). L'imbracatura viene fornita con istruzioni da leggere attentamente prima di utilizzare il sollevatore.

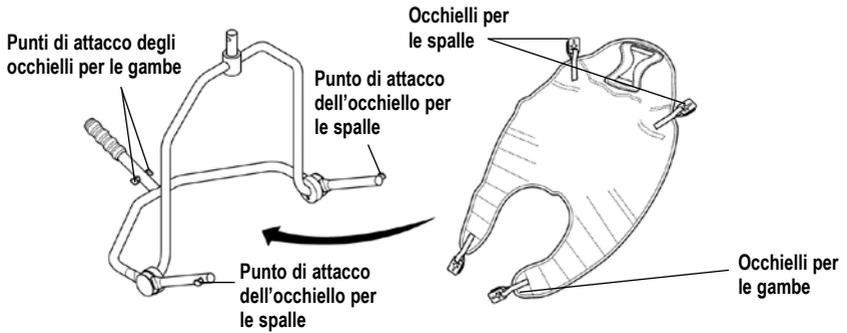

Sistema a culla a 4 punti: Esempio di un'imbracatura per il sistema a culla a 4 punti con il fermaglio di sicurezza.

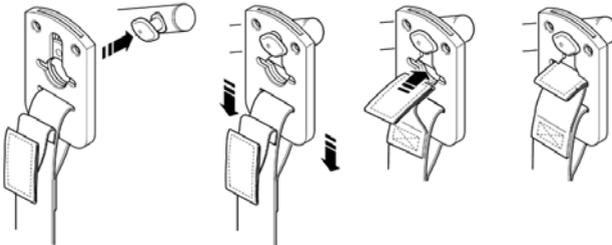

Sistema di attacco dell'imbracatura Securi3: esempio di installazione.

Rimozione della barra distanziatrice e del sistema a culla

ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLE ISTRUZIONI SEGUENTI.

Il sollevatore Presence è dotato di una barra distanziatrice a 6 punti e di un sistema a culla a 4 punti. Per rimuovere uno di questi sistemi, utilizzare il perno a sgancio rapido. La rimozione è rapida e facile, ma è necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza per assicurarsi che la barra distanziatrice/ sistema a culla sia bloccata in posizione prima dell'utilizzo.


INSTALLAZIONE

Per eseguire l'installazione, sollevare la barra distanziatrice/sistema a culla verso l'incastro del braccio.

Inserire il manicotto del perno attraverso l'attacco in plastica e sostenere il peso della barra distanziatrice/ sistema a culla.

Dopo avere allineato la barra distanziatrice/sistema a culla al sostegno del braccio, reinserire il perno a sgancio rapido nel manicotto fino a quando non si blocca in posizione. ASSICURARSI CHE IL PERNO SIA MONTATO CORRETTAMENTE.

A questo scopo premere il dito nell'estremità dove si trova lo spinotto a molla. Se il perno non si muove, il sollevatore può essere utilizzato in modo sicuro.

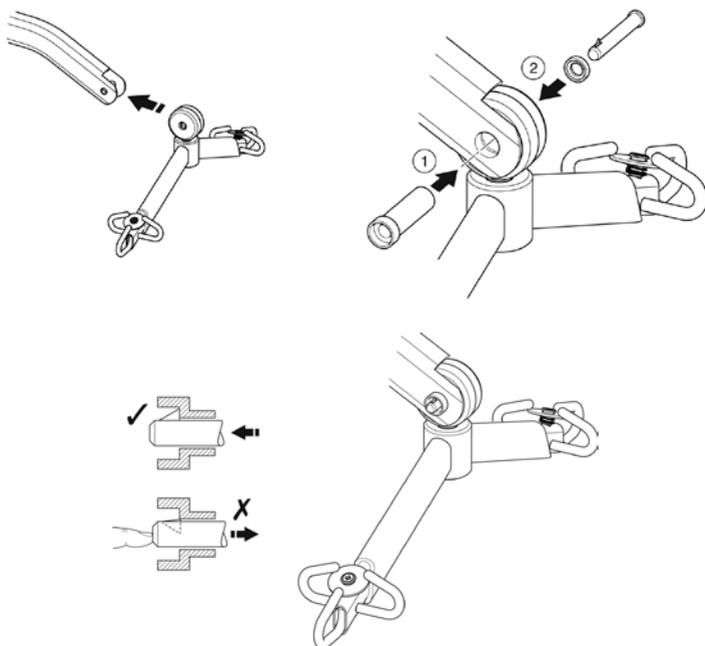


RIMOZIONE

ATTENZIONE: assicurarsi di sostenere il peso della barra distanziatrice/sistema a culla prima di rimuovere il perno.


Per staccare il perno, rilasciare lo spinotto a molla (con un cacciavite piatto o un attrezzo simile) ed estrarre il perno.

Sostenere il peso della barra distanziatrice/sistema a culla, quindi tirare il manicotto del perno nella direzione opposta estraendolo completamente dal braccio. La barra distanziatrice si sbloccherà completamente.

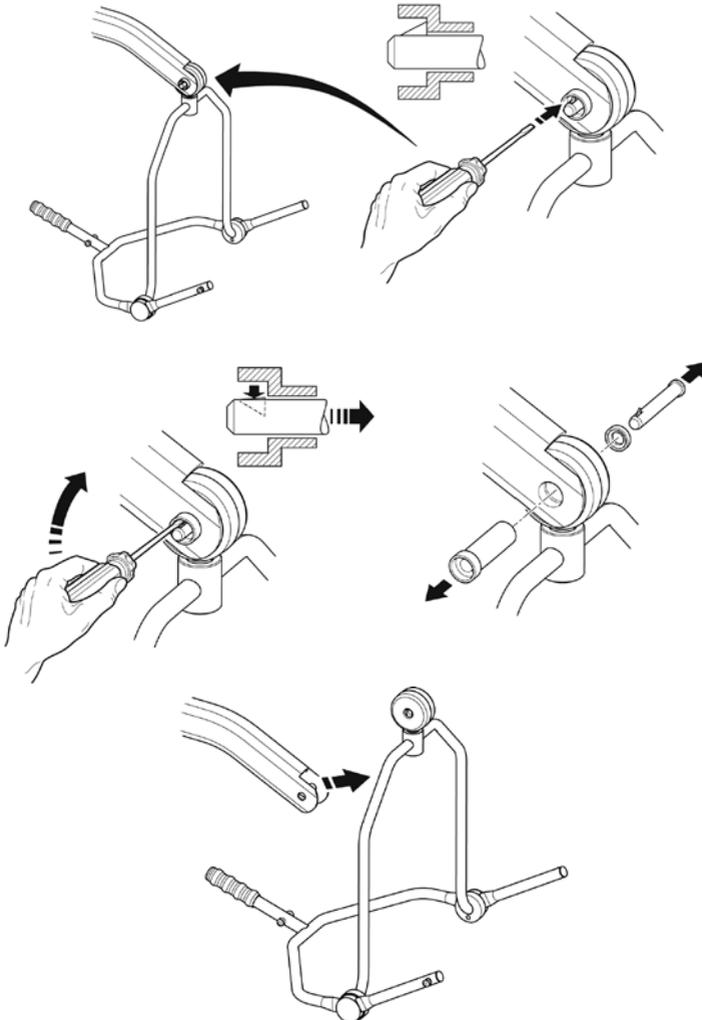

Istruzioni per la ricarica delle batterie

Le batterie sono situate nel pacco batterie e vengono ricaricate con un caricabatteria da scrivania esterno.

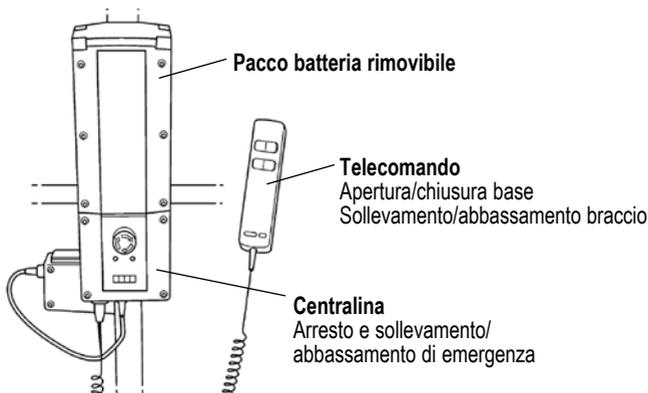

ISTRUZIONI PER LA RICARICA DEL SOLLEVATORE OXFORD PRESENCE

Se è necessario ricaricare il pacco batterie, rimuoverlo dal sollevatore e collegarlo al caricabatteria esterno.

Joerns Healthcare consiglia di acquistare un pacco batterie di ricambio in modo tale che un pacco batterie sia sempre in carica.

1. Rimuovere il pacco batterie dal sollevatore. Il pacco è fissato da un semplice gancio situato sulla parte superiore. Sollevare il gancio per liberare il pacco batterie.
2. Collegare il pacco batterie al caricabatteria. La posizione e l'aggancio del pacco batterie al caricabatteria corrispondono a quelli del sollevatore.
3. Inserire la spina del caricabatteria in una presa adatta e premere ON.
4. La ricarica è automatica e richiede dalle otto alle dodici ore. Nota: anche se si lascia il caricabatteria collegato alla presa per lunghi periodi, le batterie non si sovraccaricano.
5. Quando si desidera utilizzare di nuovo il sollevatore, scollegare l'alimentazione e rimuovere il pacco batterie dal caricabatteria. Montare il pacco batterie sul sollevatore e chiudere il gancio di fissaggio in modo che il pacco scatti in posizione. L'operazione di ricarica del sollevatore elettrico Oxford è semplice e chiara, ma è importante seguire scrupolosamente le istruzioni per la ricarica. Prestare attenzione ai seguenti avvisi onde evitare problemi legati alle batterie scariche.

⚠ AVVISO

Mantenere le batterie **SEMPRE** cariche. Mettere la batteria sotto carica ogni qualvolta non venga utilizzato il sollevatore. Se è più pratico, ricaricare le batterie ogni notte. Il caricabatteria non lascerà che esse si sovraccarichino.

⚠ AVVISO

NON scaricare **MAI** completamente le batterie. Non appena si sente l'allarme, completare l'operazione di sollevamento in corso e mettere il sollevatore sotto carica.

⚠ AVVISO

NON lasciare **MAI** inutilizzato il pacco batterie per lunghi periodi senza caricarlo regolarmente durante il periodo di inattività.

⚠ AVVISO

Assicurarsi **SEMPRE** che il caricabatteria sia spento prima di collegare o scollegare il pacco batterie.

⚠ AVVISO

NON lasciare **MAI** il pacco batterie collegato al caricabatteria spento.

⚠ AVVISO

Non ricaricare un sollevatore elettrico in bagno.

Programma di manutenzione e lista di controllo quotidiana

Tutti i prodotti Oxford necessitano di una manutenzione minima, tuttavia è importante eseguire alcuni controlli e seguire delle procedure per garantirne la sicurezza. Segue un programma dettagliato delle operazioni da eseguire QUOTIDIANAMENTE. I controlli quotidiani, la manutenzione semestrale, i controlli e il test faranno sì che il sollevatore funzioni sempre in modo sicuro ed ottimale. È disponibile, su richiesta, un elenco delle parti di ricambio.

Il **TEST DI CARICO** e la **CERTIFICAZIONE** dovranno essere eseguiti solo da un tecnico autorizzato o da un rivenditore Joerns Healthcare.

LISTA DI CONTROLLO QUOTIDIANA: Joerns Healthcare raccomanda vivamente che i seguenti controlli vengano eseguiti ogni giorno e prima di utilizzare il sollevatore.

- ASSICURARSI che le routine del sollevatore si muovano liberamente.
- ASSICURARSI che la barra distanziatrice sia libera di ruotare ed oscillare.
- CONTROLLARE che sia ben agganciata al braccio.
- CONTROLLARE che i ganci/fermagli sulla barra distanziatrice e i sospensori laterali non siano troppo consumati.
- ASSICURARSI che la base si apra e si chiuda correttamente.
- AZIONARE il telecomando per assicurarsi che il braccio si alzi e si abbassi correttamente.
- Sui sollevatori elettrici verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza.
- CONTROLLARE che le imbracature non siano logore o in qualche modo danneggiate. In caso contrario, NON utilizzarle.
- ASSICURARSI che l'allarme delle batterie scariche non suoni quando si utilizza il telecomando. Se l'allarme dovesse suonare, NON utilizzare il sollevatore e metterlo immediatamente sotto carica.

MANUTENZIONE, CONTROLLI E TEST

Joerns Healthcare consiglia di eseguire regolarmente un controllo e un test approfonditi del sollevatore Oxford Presence e degli accessori di sollevamento, delle imbracature, della bilancia e così via. Il controllo e il test vanno eseguiti secondo le raccomandazioni e le procedure riportate di seguito. Joerns Healthcare raccomanda che le operazioni vengano eseguite esclusivamente da tecnici/rivenditori autorizzati.

NOTA: queste raccomandazioni sono conformi ai requisiti delle norme 1998 No2307 Health and Safety: The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. Queste sono norme britanniche. Fare sempre riferimento alle leggi vigenti nella Nazione in cui si vive.

* LISTA DI CONTROLLO

	Alla consegna	Prima dell'uso	Manutenzione periodica
1. BARRA DISTANZIATRICE: assicurarsi che sia libera di ruotare ed oscillare. Controllare l'eventuale usura del perno centrale. Verificare che sia bene agganciata al braccio.	✓	✓	
2. BRACCIO: controllare che il braccio sia bene agganciato all'albero. Assicurarsi che il movimento laterale del braccio sia minimo e che il braccio sia libero di ruotare sul suo sostegno.	✓	✓	
3. ALBERO: controllare il funzionamento del meccanismo di blocco dell'albero. Assicurarsi che l'albero sia ben inserito nell'incavo. Controllare che in basso l'attuatore sia ben inserito.	✓	✓	
4. ATTUATORE: l'attuatore non dovrebbe richiedere manutenzione, a parte il controllo del corretto funzionamento e il rilevamento di eventuali rumori insoliti.		✓	
5. PACCO BATTERIE: verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza e dei pulsanti di sollevamento/abbassamento di emergenza.	✓	✓	
6. BATTERIE: le batterie sono situate nel pacco batterie e non richiedono alcuna manutenzione, a parte una ricarica regolare come indicato nelle istruzioni per la ricarica. Assicurarsi che le connessioni siano pulite.			✓
7. REGOLAZIONE DELLA BASE: assicurarsi che la base si apra e si chiuda correttamente.	✓	✓	
8. RUOTINE: controllare che le ruotine siano saldamente fissate alla base. Verificare che le ruote e le ruotine girino liberamente.	✓	✓	
9. PULIZIA: pulire con sapone comune e acqua e/o un qualsiasi disinfettante per superfici rigide. Non utilizzare prodotti chimici acidi o abrasivi in quanto possono danneggiare le parti verniciate del sollevatore. Evitare di bagnare le parti elettriche.		✓	
10. TEST DI CARICO: dovrebbe essere condotto in conformità alle procedure del produttore. Si raccomanda vivamente di far eseguire il test da un rivenditore autorizzato.			✓
11. BASE ERUOTE: assicurarsi che la base sia piana e regolare (tutte le quattro ruote devono essere appoggiate a terra).	✓	✓	
12. IMBRACATURE: controllare che non siano logore o consumate.		✓	
13. LUBRIFICAZIONE: lubrificare i giunti, compresi gli attacchi dell'albero e del braccio, il gruppo dei pedali e il giunto della barra distanziatrice (solo se necessario).		✓	
14. TELECOMANDO: inserire il telecomando nella centralina.	✓	✓	
15. PERNO ASGANCIO RAPIDO: assicurarsi che il perno sia saldamente montato prima di sollevare il paziente. A questo scopo premere l'estremità con lo spinotto.	✓	✓	

Specifiche tecniche

Portata massima	500 lbs	227 kg
Lunghezza massima totale.....	57.5 inches	1460 mm
Lunghezza minima totale	55.1 inches	1400 mm
Altezza massima totale	81.3 inches	2065 mm
Altezza minima totale	57.5 inches	1460mm
Altezza massima barra distanziatrice.....	75.2 inches	1910 mm
Altezza minima barra distanziatrice	16.9 inches	430 mm
Altezza all'altezza massima raggiungibile.....	51.5 inches	1310 mm
Altezza raggiungibile all'altezza massima.....	25.6 inches	650 mm
Altezza raggiungibile all'altezza minima.....	15.7 inches	400 mm
Altezza massima raggiungibile*	36.6 inches	930 mm
Raggio di curva	64.2 inches	1630 mm
Base aperta - Larghezza esterna.....	45.2 inches	1150 mm
Base aperta - Larghezza interna.....	40.1 inches	1020 mm
Base chiusa - Larghezza esterna.....	26.4 inches	670 mm
Base chiusa - Larghezza interna.....	21.6 inches	550 mm
Altezza complessiva della base	4.7 inches	120 mm
Distanza da terra	1.4 inches	35 mm
Ruotine anteriori	4 inches	100 mm
Ruotine posteriori provviste di freni.....	4 inches	100 mm

*L'altezza massima equivale alla distanza dal centro della barra distanziatrice alla parte anteriore dell'albero.

Sistema a culla a 4 punti (misura fino in cima ai perni di posizione)

Altezza massima sistema a culla	61 inches	1550 mm
Altezza minima sistema a culla (utilizzabile).....	15.4 inches	390 mm

Pesi

Albero, base e braccio	81.4 lbs	37 kg
(compresa barra distanziatrice a 6 punti)		
Pacco batterie	6.6 lbs	3 kg
Totale.....	88 lbs	40 kg
Base (esclusa la batteria).....	44 lbs	20 kg
Albero e braccio (esclusa la batteria).....	37.4 lbs	17 kg
Sistema a culla a 4 punti.....	13.2 lbs	6 kg

Tutte le misure rientrano in una tolleranza di +5/-5 gradi.



SPECIFICHE ELETTRICHE

BATTERIE 12 volt, ricaricabili al gel
 CAPACITÀ DELLA BATTERIA 3,2 Ah
 INGRESSO NOMINALE CARICABATTERIA 230 V c.a., 50/60Hz
 USCITA NOMINALE CARICABATTERIA 27,4/29,0 V c.c., 0,8 A

Protezione da shock elettrico

CARICABATTERIA CLASSE II
 SOLLEVATORE ALIMENTAZIONE INTERNA

Grado di protezione da shock

CARICABATTERIA TIPO B
 SOLLEVATORE TIPO B
 TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: $>+5^{\circ} <+40^{\circ}$

Al di fuori di questo range di temperatura la funzionalità e la sicurezza possono essere compromesse.

Test

Joerns Healthcare ha costituito un'affermata rete di distributori e di tecnici preparati che saranno lieti di gestire tutte le richieste di acquisto, garanzia, riparazione e manutenzione.

I nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data di fabbricazione o 24 mesi dalla data di acquisto se ordinati da un rivenditore autorizzato. Questa garanzia copre il telaio, l'attuatore, la centralina e il telecomando del sollevatore.

Si consiglia di acquistare tutti i nostri prodotti presso un rivenditore in grado di fornire assistenza qualora ve ne fosse bisogno. Il rivenditore o il distributore sono responsabili del programma di garanzia, quindi è importante registrarne il nome, l'indirizzo e il numero di telefono, in modo da poterli contattare in caso di necessità.

Se vi sono dubbi su dove sia stato acquistato il sollevatore, Joerns Healthcare può rintracciare il rivenditore tramite il numero di serie del sollevatore.

ATTENZIONE: contattare il rivenditore per acquisti, garanzia, riparazioni, assistenza e manutenzione certificata.

Distributore:





Distribuito da:
Sunrise Medical Srl.
Via Riva 20 - Montale
29100 Piacenza
ITALIA
Tel: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

Joerns Healthcare Ltd
High Street, Wollaston
Stourbridge, West Midlands
DY8 4PS
ENGLAND
Tel: +44 (0)1384 44 66 22
Fax: +44 (0)1384 44 66 01

